

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ

Систему Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre

Пришло время изменений в контроле уровня глюкозы.*

Датчик FreeStyle Libre



- Маленький и незаметный, всего 35 x 5 мм (размером с монету достоинством 5 рублей)
- Необходимо менять только раз в две недели
- Водонепроницаем, его можно использовать при принятии ванны, душа, во время плавания,** или тренировок
- Не требует калибровки с использованием глюкометра (откалиброван на заводе)

Сканер FreeStyle Libre

Сообщения

Важные сообщения появляются здесь

Текущий уровень глюкозы

Примечание о еде

Еду можно вносить в граммах или ХЕ



Коснитесь, чтобы добавить примечания

Заряд аккумулятора

Состояние датчика

Стрелка тенденции уровня глюкозы

История уровня глюкозы за последние 8 часов

Встроенные глюкометр и кетометр


- Компактный и легкий, удобно держать в руках и носить с собой
- Цветной сенсорный дисплей с подсветкой – делает использование более удобным, показания видны в темноте; – показывает историю изменения уровня глюкозы с помощью понятных графиков
- Хранит информацию об уровне глюкозы до 90 дней*** – предоставляет полный гликемический профиль за 3 месяца

Как это работает¹

1 ЗАКРЕПИТЕ маленький датчик на внешней стороне плеча



2 СКАНИРУЙТЕ ДАТЧИК для мгновенной проверки уровня глюкозы, даже через одежду²

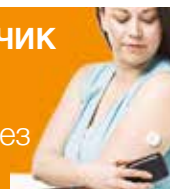

3 ПРОСМАТРИВАЙТЕ ПОКАЗАНИЯ, а также историю за последние 8 часов и стрелку тенденции, показывающую направление изменения уровня глюкозы – растёт, падает или неизменен



СИСТЕМА FLASH МОНИТОРИНГА ГЛЮКОЗЫ

* Требуется определение уровня глюкозы с помощью глюкометра в периоды резких ее колебаний, так как уровень глюкозы в интерстициальной жидкости не отражает точный уровень глюкозы в крови, а также в случаях гипогликемии или угрозы гипогликемии и в случаях, когда симптомы не соответствуют показаниям системы.

** Датчик может выдержать погружение в воду на глубину 1 метр не более, чем на 30 минут.

*** Для получения полной гликемической картины за последние 3 месяца датчик необходимо менять каждые 14 дней, и сканировать как минимум 1 раз в 8 часов.

¹ Для получения дополнительной информации по использованию изделия обратитесь к инструкции.

² Сканер может получать данные с датчика, когда находится на расстоянии 1–4 см от него.

FreeStyle Libre, Flash – зарегистрированные товарные знаки компании Abbott.

Информация предназначена для использования медицинскими и фармацевтическими работниками, не подлежит демонстрации пациентам.

ООО «Эбботт Лабораториз», 125171, Москва, Ленинградское шоссе 16А, стр.1,
ОГРН 1077746154859. Сканер FreeStyle Libre системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre PV № P3H 2018/6766 от 24.01.2018;
Датчик FreeStyle Libre системы Flash мониторинга глюкозы FreeStyle Libre PV № P3H2018/6764 от 24.01.2018

Узнайте больше на
FreeStyleLibre.ru

